

INSTRUCCIONES PARA TOMAR Y SECAR LA MUESTRA DE ORINA

Agotamiento
crónico

Dificultades de
Concentración

Dolor de
Cabeza

Agotado?

sin fuerza

alto nivel
de estrés

miedo

Inquieto

taquicardia


Dificultad
al dormir



INSTRUCCIONES PARA TOMAR Y SECAR LA MUESTRA DE

Orina

Paso 1

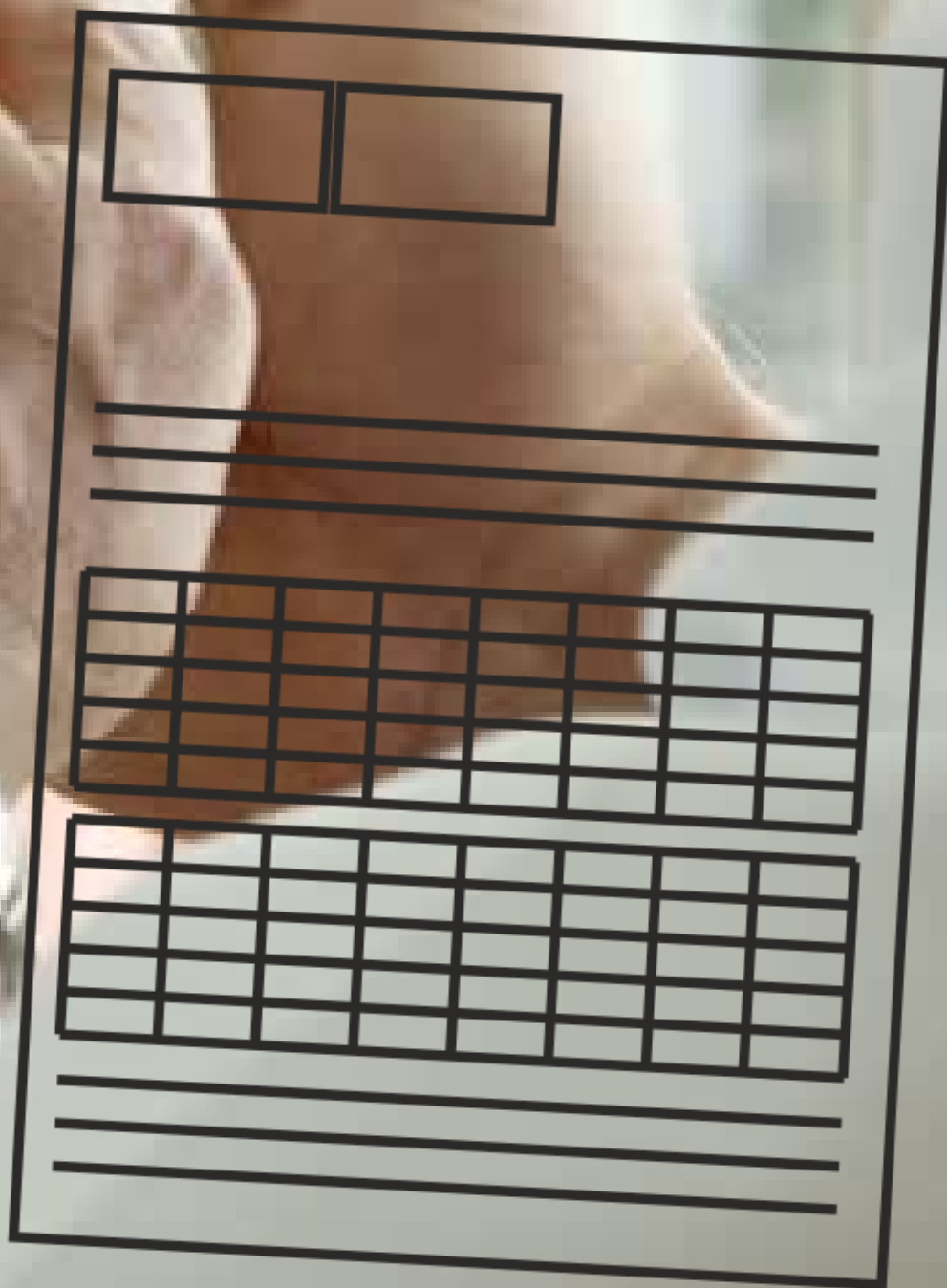

A hand holding a laboratory form. The form has a header with two boxes, followed by three horizontal lines. Below these are two large grids, each with 10 columns and 5 rows. At the bottom of the form are three horizontal lines for a signature.

Complete el formulario del laboratorio por completo y fírmelo al respaldo.

TOMA DE LAS
MUESTRAS



Paso

2



Recoja la segunda orina de la mañana * en un recipiente .

(por ejemplo, un vaso de plástico).*

Segunda orina por la mañana **después** de levantarse.

No beba demasiado entre la primera y la segunda micción matutina. Si la orina es demasiado fina, no se puede realizar ninguna evaluación.

TOMA DE LAS
MUESTRAS




Paso

3

NEURO
SPOT

PLUS

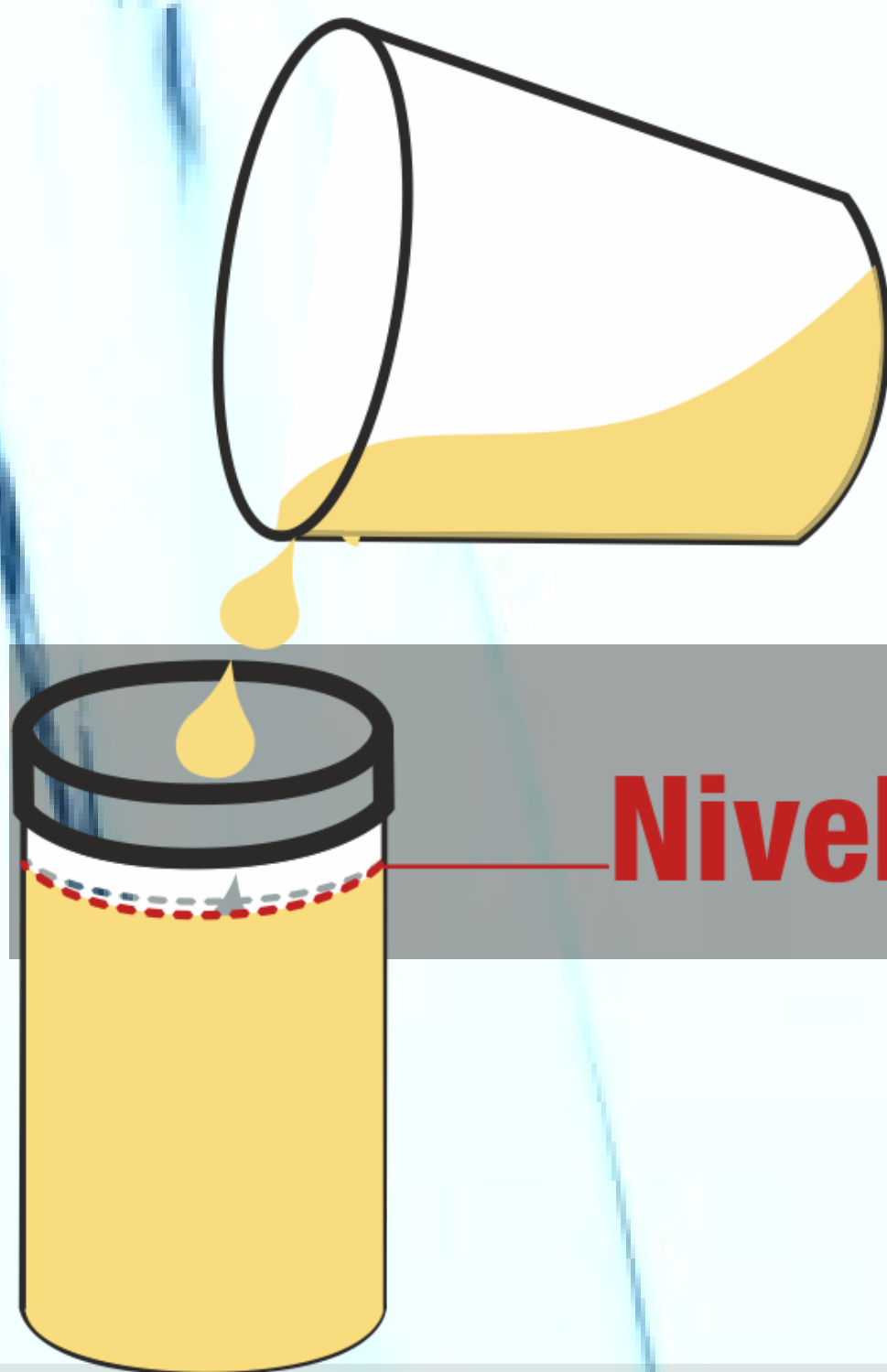

Nivel maximo

Llene el recipiente colector abierto con la orina aún tibia (vea la marca en la imagen).


ATENCIÓN: Asegúrese de dejar el polvo en el recipiente.

TOMA DE LAS
MUESTRAS



Paso 4

NEURO
SPOT
PLUS

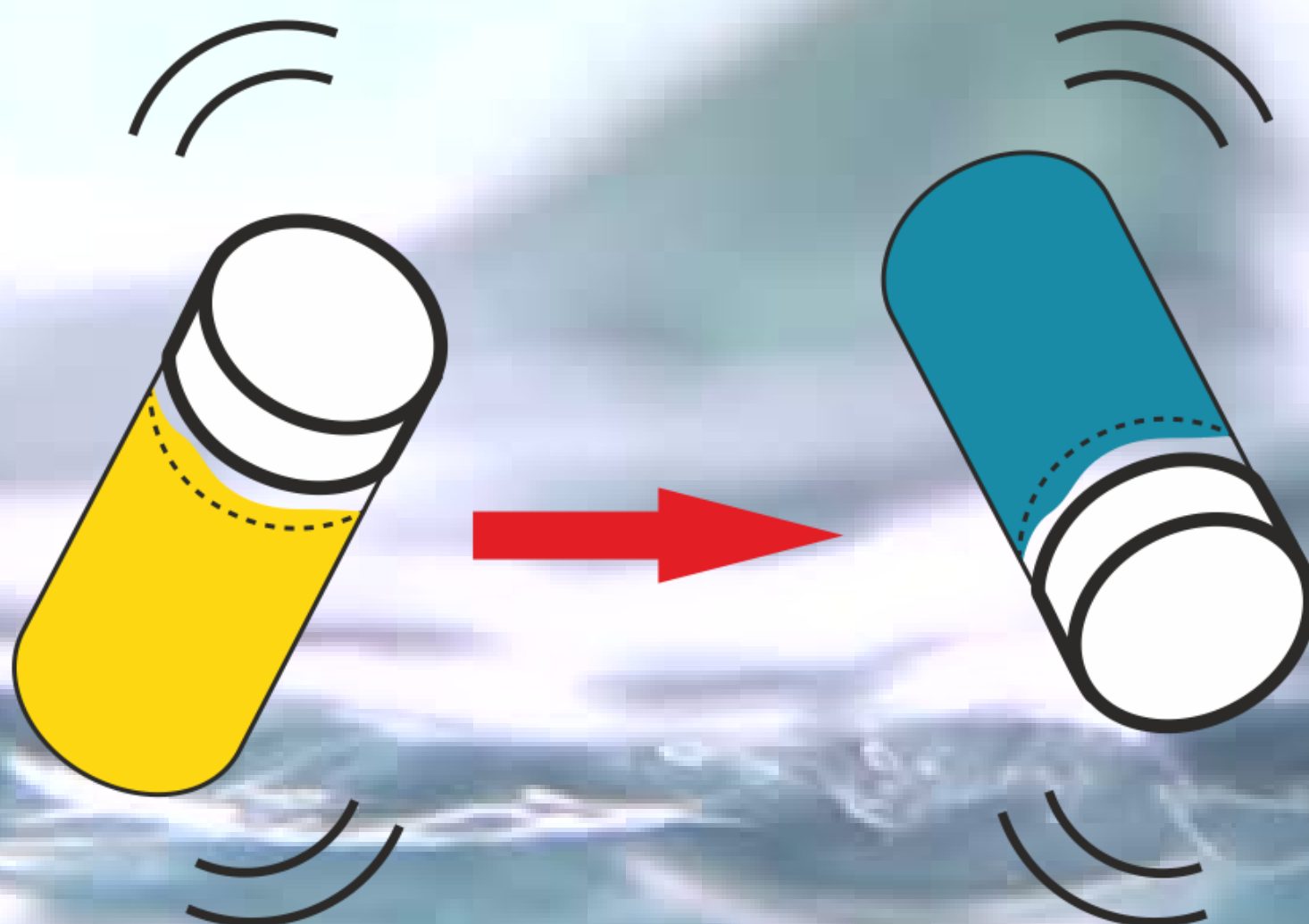

¡Cerrar la tapa! Agite suavemente boca abajo hasta que el polvo se disuelva por completo.


Color: amarillo → azul

TOMA DE LAS
MUESTRAS



Paso 5

NEURO
SPOT
PLUS

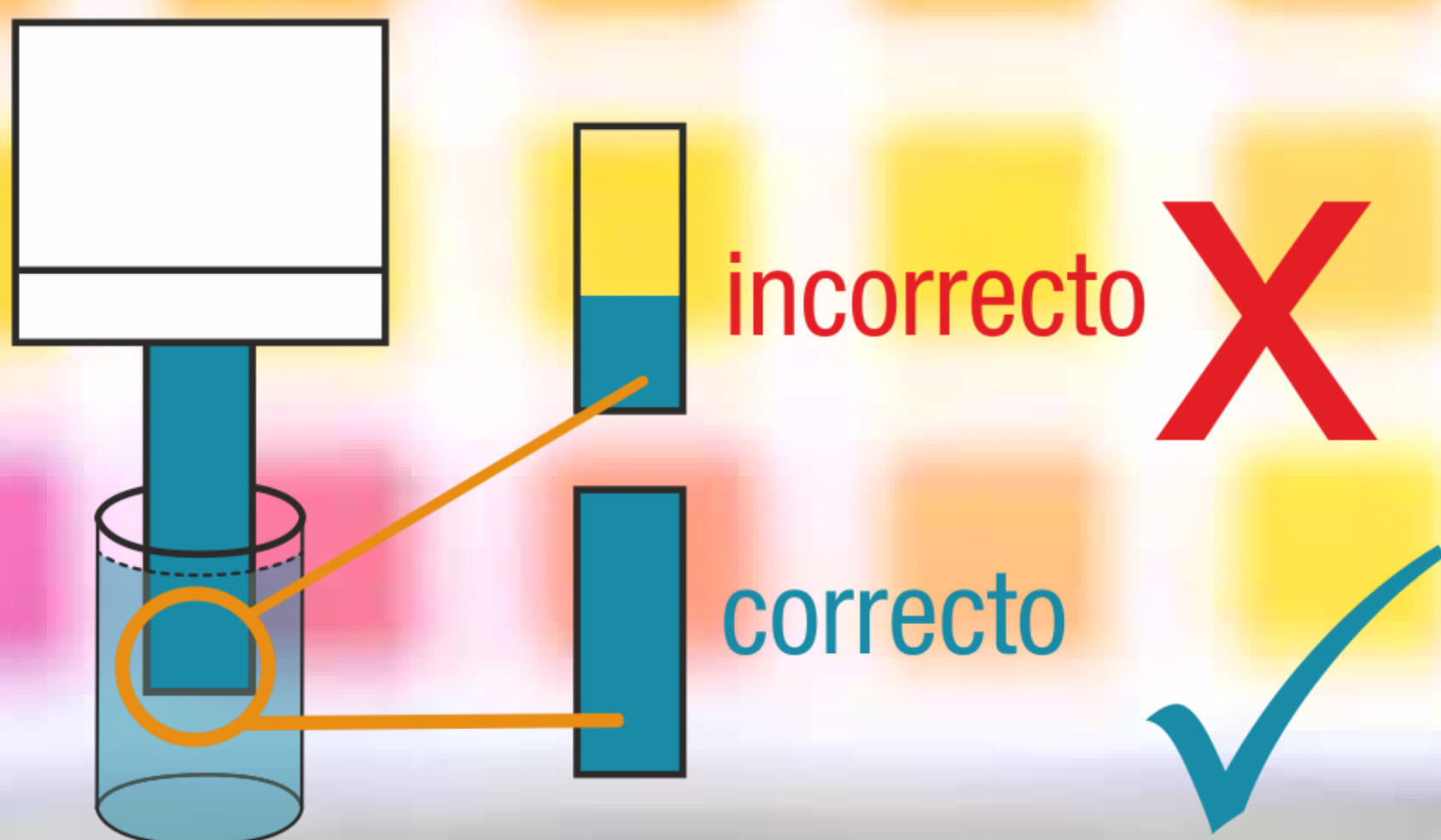


Desatornille la tapa. Sumerja brevemente la tira reactiva hasta que se empape el papel.

ATENCIÓN: El papel debe estar completamente humedecido, de lo contrario pueden producirse resultados de análisis incorrectos.

TOMA DE LAS
MUESTRAS



Paso 6

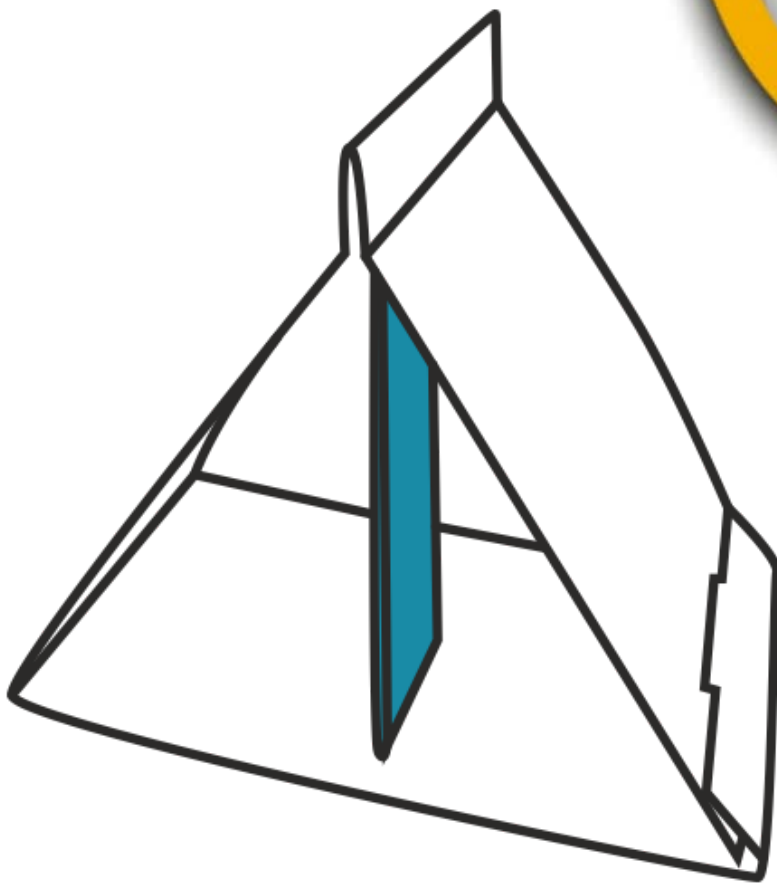

24 Horas.

1. Quite las gotas con una toalla de papel.
2. Doble la tarjeta de prueba en un triángulo.
3. Déjelo secar a temperatura ambiente al menos **24 horas**, fuera de la luz solar directa.

TOMA DE LAS
MUESTRAS

E·U·i·r·o
L·i·f·e

visítanos...

www.eurolife.com.co



+ 57 315 893 3411

